



Mode d'emploi pour l'utilisation de la ceinture pelvienne de contention Oxyliam

- 1- Ceinture pelvienne a été conçu pour être mise sur un fauteuil
- 2- S'assurer d'avoir la bonne grandeur de ceinture en fonction du patient
- 3- Placer la ceinture pelvienne pour favoriser le confort du client
- 4- Passer les sangles autour du fauteuil afin de les rejoindre derrière
- 5- En faisant face au dos du fauteuil, insérer la sangle dans l'attache métallique gauche en repliant celle-ci vers l'intérieur.
- 6- Poursuivre en insérant la sangle dans l'attache métallique droite
- 7- Choisir la tension de la sangle en fonction du patient
- 8- Passer la sangle en-dessous du fauteuil
- 9- Réunir les trois sangles ensemble afin d'aligner les trois œillets ensemble afin d'insérer le bouton aimanté
- 10- Vérifier le positionnement ainsi que le niveau d'aisance du patient
- 11- Réajuster au besoin si la ceinture n'est pas ajustée
- 12- Utiliser la clé magnétique bleue afin d'enlever la ceinture de contention Oxyliam