

TOILE GLISSANTE PLAT #200P

4566




EN TISSU IMPERMÉABILISÉ, ANTI-FONGIQUE ET ANTI-BACTÉRIEN EN NYLON DE HAUTE DENSITÉ ULTRA GLISSANT

ENTRETIEN DE LA TOILE

INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la Toile

LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux à basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F pendant au moins **trois minutes**.



Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.



Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une température maximale de 25°C ou 90°F.

NE PAS APPLIQUER DE PRESSION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSION. NE PAS TORDRE LE TISSU.



Ne pas repasser.