

Boutons d'appel et récepteur sans fil



1000 pieds/ 300 mètres



55 sonneries



IP55 hydrofuge



0-110 db - 5 niveaux

Guide d'utilisation

Utilisation recommandée :

Utilisation à domicile :

- Pour un bénéficiaire appelant le proche aidant à domicile.
- Le bouton d'appel est hydrofuge est facile à transporter.
- Peut être placé dans une poche ou porté au cou comme un pendentif avec la sangle fournie.
- Le récepteur/téléavertisseur possède 55 sonneries différentes.
- La portée du signal est de 1000 pieds (300 mètres).
- 5 niveaux de volume ajustable allant de 0 dB à 110 dB.
- Installation facile.



Récepteur




Aimants de porte




Boutons d'appel




Installation:

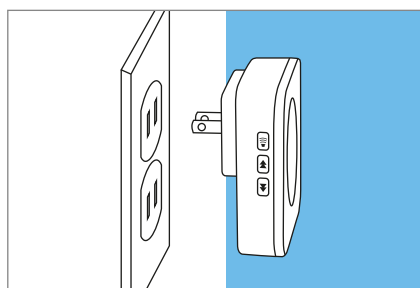


Branchez le récepteur dans une prise de 110-260v.

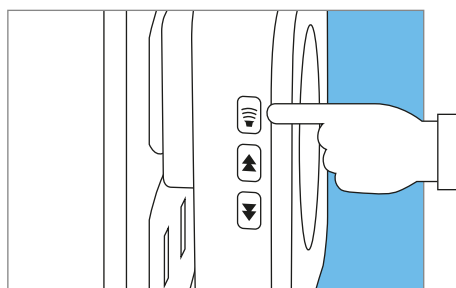


Jumelage d'un bouton avec le récepteur

- 1- Appuyez sur le bouton  et maintenez pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son. (La cloche sera en mode jumelage, vous avez 8 secondes pour faire des ajustements.)
- 2- Appuyez rapidement au centre du bouton d'appel. Le récepteur fera un son et clignotera
- 3- Appuyez encore une fois sur le bouton d'appel pour confirmer le jumelage.


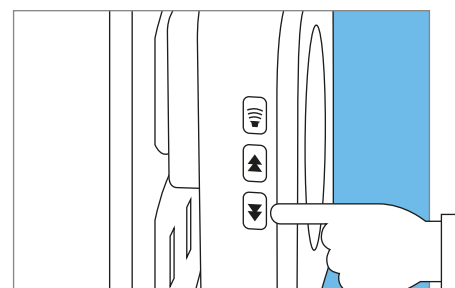


Supprimer le jumelage des boutons d'appels

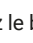
- 1- Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes, jusqu'à vous entendiez le son "ding" et que la lumière du récepteur clignote.


Comment l'utiliser :

- 1-Branchez le récepteur dans une prise 110-260v.
- 2-Placez le bouton d'appel là où vous souhaitez l'utiliser, et une fois les portes fermées, appuyez sur le bouton pour tester si la cloche du récepteur sonne.
 - a.Si le récepteur ne sonne pas, ceci peut être dû au métal à proximité. Tentez de repositionner le bouton d'appel.
- 3.Collez le bouton d'appel à l'aide du ruban adhésif double-face fourni.

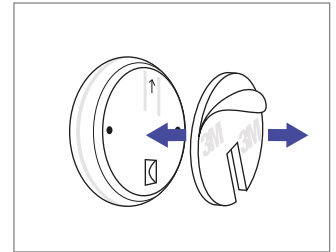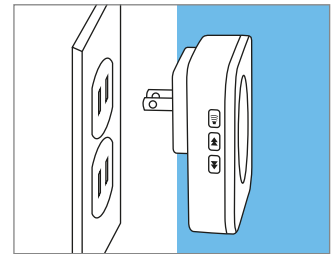



Niveau sonore (jusqu'à 5 niveaux):

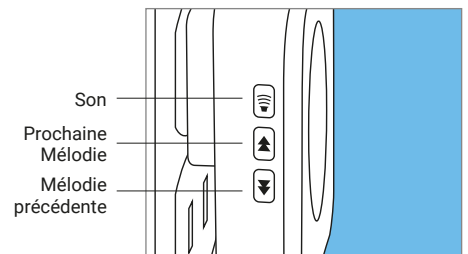- Le volume de la cloche peut être ajusté en appuyant sur 
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le volume augmente.
- Si le volume maximum est atteint, il retournera au niveau 1, ce qui est le mode silencieux.



Changer la mélodie :

La mélodie peut être définie sur l'une des 55 sélections.

Appuyez sur le bouton  ou  pour choisir la mélodie.



Changer la batterie :

Faites glisser le couvercle arrière dans la direction de la flèche.

Retirez les trois vis à l'aide d'un tournevis philips et retirez le couvercle protecteur.

Retirez et changez la batterie.



Remplacez le couvercle protecteur avec les vis et faites glisser le couvercle arrière.

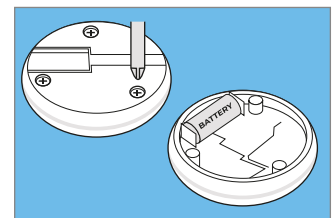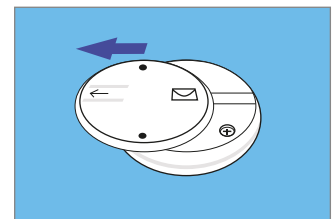

Comment utiliser les aimants:

1-Fermer la porte et coller une partie de l'aimant sur le cadre de la porte et l'autre partie sur la porte de façon à ce qu'elles soient côte à côte.

2-Lorsque la porte s'ouvre, si les aimants sont séparés de 4 pouces ou plus, le signal est envoyé au récepteur.

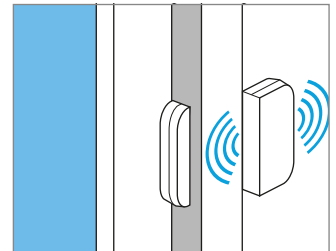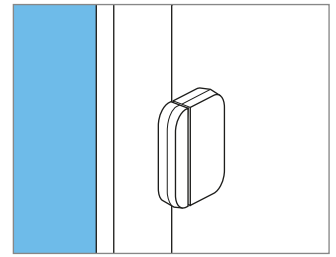

Problème ?

Si le récepteur ne sonne pas, c'est possiblement à cause de l'une de ces situations

- 1- Les batteries du bouton d'appel n'ont plus d'énergie.
- 2- La batterie sont insérer de la mauvaise manière.
- 3- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence électromagnétique entre le bouton d'appel et le récepteur.
- 4- La distance de connectivité est réduite lorsqu'il y a des murs ou des objets métalliques entre le bouton d'appel et le récepteur.



Innovet - Prévenir - Communiquer