

Instruction d'utilisation

433-CMU

Moniteur central sans fil et système d'appel avec téléavertisseur



433-CMU comprend:

- 433-CMU Moniteur central
- 2 Vis
- Une attache de fixation

Accessoires optionnelles

433-CMU comprend: Accessoires optionnelles (vendu séparément):

- Téléavertisseur sans affichage LCD (433-PG)
- Téléavertisseur avec affichage LCD (433-PGD)
- Bouton d'appel sans fil (433-NC)
- Détecteur de mouvement sans fil (433-MS)
- Coussinet sensoriel pour lit ou fauteuil sans fil
- Contacteur de sortie pour porte ou fenêtre (433-EXT)
- Adaptateur CA (AC-04)



433-PGD
Téléavertisseur pour le personnel soignant avec affichage LCD.



433-NC
Bouton d'appel sans fil.




433-PG
Téléavertisseur sonore pour le personnel soignant.

Note du fabricant:

Le fait de ne pas se conformer aux avertissements de sécurité peut entraîner des blessures ou même la mort. Ce produit n'est pas pertinent pour tous les individus. D'autres types d'équipements pourraient s'avérer nécessaires. Ce produit n'est pas un substitut à une supervision visuelle par le personnel. Le fabricant ne prétend pas que le produit empêchera les fugues ainsi que les chutes. Ce produit a été conçu pour permettre d'augmenter l'efficacité du personnel dans leur protocole de gestion de chute. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Lisez les directives ainsi que les avis légaux.

Le moniteur central 433-CMU de la compagnie Smart Caregiver a été conçu pour permettre à l'utilisateur de faire l'installation lui-même, de ce fait il est de l'entière responsabilité de l'acheteur de s'assurer que le produit est installé adéquatement. De plus ce produit n'est pas conçu pour pallier une supervision adéquate par le personnel sans être limité:

1. Supervision direct du résident
2. Formation adéquate du personnel
3. Vérification du système avant chaque utilisation.

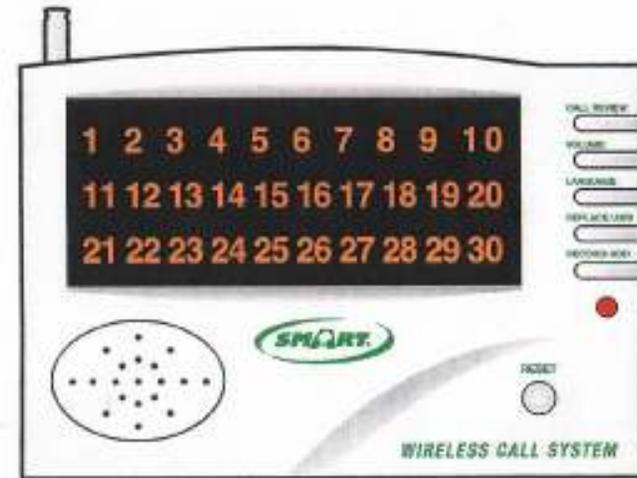

Accessoires optionnelles



433-PGD
Téléavertisseur pour le personnel soignant avec affichage LCD.



433-NC
Bouton d'appel sans fil.




433-PG
Téléavertisseur sonore pour le personnel soignant.



1 Insérez les piles dans chaque composantes

433-CMU Moniteur central économique

Piles non incluse

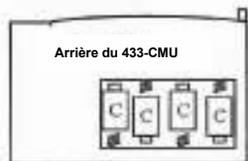

433-NC Bouton d'appel (Optionnel)

Pile incluse



Dessus



Arrière




Intérieur

Insérez une lame droite de tournevis dans l'encoche et tournez délicatement jusqu'à ce que le couvercle se soulève.

433-MS Détecteur de mouvement (Optionnel)

Piles non incluses

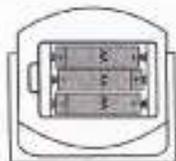

433-NCA Émetteur (Optionnel)




Pile incluse déjà installé

433-EXT Détecteur de sortie pour porte/fenêtre (Optionnel)

Pile incluse

Soulevez délicatement la languette sur le dessus du 433-EXT

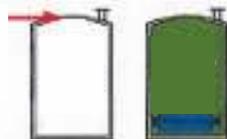


Arrière du 433-EXT

Intérieur du 433-EXT

433-PG Téléavertisseur (Optionnel)


Piles non incluse

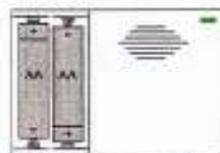

Avant du téléavertisseur

433-PGD Téléavertisseur avec affichage LCD (Optionnel)

Piles non incluse

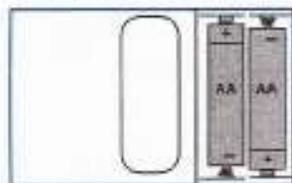

Arrière du téléavertisseur

2 Ajustement du langage et du volume du moniteur central et du téléavertisseur



433-CMU




433-FC

Pour sélectionner la langue ou une tonalité, appuyez sur le bouton (langue) sur le moniteur central, pour le téléavertisseur le contact sur le coté doit être à (ON).

Appuyez le bouton (langue) jusqu'à ce que vous obteniez la bonne langue. Une fois la langue obtenue lâchez le bouton.



433-CMU

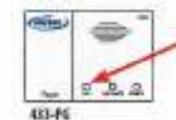

433-FC

Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton (Volume) sur le moniteur central, pour le téléavertisseur choisissez une des trois options en appuyant répétitivement sur le bouton (Volume). L'ajustement du fabricant pour le volume est à 90 décibels. (90 décibels est la norme acceptée par la loi)

3 Configurer les composantes avec le moniteur central

Avant de programmer l'unité central et ses composantes, assurez vous de lire les instructions des composantes que vous vous préparez à configurer avec votre moniteur central. **Préparez la composante que vous devez programmer avant de commencer.** L'unité central sort automatiquement du mode programmation après 30 secondes d'inactivité. Si vous ne vous êtes pas préparé vous serez obligé de recommencer depuis le début.




Avant de configurer l'unité central et ses composantes, soyez assuré que le contact sur le coté de l'unité central est à la position (UNLOCK). Une fois la programmation terminée remettre le contact sur le coté à (LOCK) afin d'éviter toute modification.

433-NC Instruction pour configurer Bouton d'appel (Optionnel)



433-CMU

Appuyez et tenir le bouton (RECORD/ADD) jusqu'à ce que vous entendiez 2 (dings) et une longue tonalité.

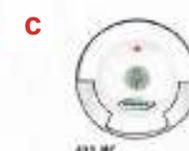

433-NC

Appuyez et relâchez le prochain bouton d'appel ou une autre composante que vous aimeriez programmer, répéter la séquence B jusqu'à ce que tous les composants soit programmé.



433-NC

Appuyez et relâchez le bouton d'appel. Le moniteur central parlera et affichera un numéro. Le numéro affiché correspondra au bouton d'appel. Attendez une tonalité longue avant d'ajouter d'autres composantes ou terminer la programmation.





433-CMU


Appuyez sur le bouton (RESET) pour quitter le mode programmation quand tout sera complété.

Si vous n'attendez pas que le moniteur central émette une longue tonalité avant d'appuyer sur le prochain bouton d'appel ou autre composante, chaque composante sera configuré avec le même numéro sur le moniteur central. Dans ce cas, les numéros énoncés ne concorderont pas avec les numéros affichés. Quand plusieurs composantes sont programmées avec le même numéro sur l'unité central, les numéros énoncés ne correspondront pas avec le numéro affiché. Cela pourrait être utile quand plusieurs composantes sont utilisées pour la même chambre, mais pas pour d'autre situation.

433-NCA Instruction pour configuration, émetteur pour moniteur (Optionnel)

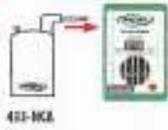
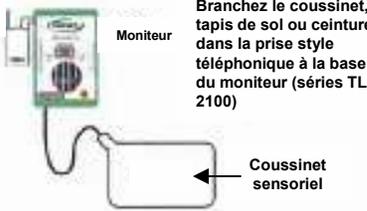
- a**  Branchez l'émetteur dans le port de cloche d'appel sur le côté du moniteur (séries TL-2100)
- b**  Branchez le coussinet, tapis de sol ou ceinture dans la prise style téléphonique à la base du moniteur (séries TL-2100)
- c** Répétez les étapes (A) et (B) pour tout moniteur avec émetteur que vous voulez ajouter au moniteur central.
- d**  Appuyez sur le coussinet, tapis de sol ou détacher ceinture. Le moniteur central parlera et indiquera un numéro. Le numéro affiché correspondra au moniteur avec l'émetteur sur le moniteur central.
- e**  Appuyer et tenir le bouton (Record/Add) jusqu'à ce que vous entendiez 2 (dings) et une tonalité longue.
- f**  Appuyer sur le bouton (Reset) pour sortir du mode programmation.
- Attendez que le moniteur central émette une tonalité longue. Alors répéter l'étape (D) avec le prochain émetteur ou suivre les instructions pour configurer un autre composante que vous désiriez ajouter.

433-MS Instruction pour configuration, détecteur de mouvement (Optionnel)

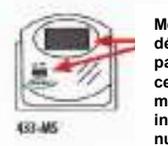- a**  Appuyer et tenir le bouton (Record/Add) jusqu'à ce que vous entendiez 2 (dings) et une tonalité longue.
- b**  Mettre sous tension le détecteur de mouvement et passer votre main devant la cellule de détection. Le moniteur central parlera et indiquera un numéro. Le numéro affiché correspondra au moniteur avec le détecteur de mouvement sur le moniteur central.
- c**  Attendez que le moniteur central émette une tonalité longue. Alors répéter l'étape (B) avec le prochain détecteur de mouvement ou suivre les instructions pour configurer un autre composante que vous désiriez ajouter.
- d**  Appuyer sur le bouton (Reset) pour sortir du mode programmation.

Si vous n'attendez pas que le moniteur central émette une longue tonalité avant d'appuyer sur le prochain bouton d'appel ou autre composante, chaque composante sera configuré avec le même numéro sur le moniteur central. Dans ce cas, les numéros énoncés ne concorderont pas avec les numéros affichés. Quand plusieurs composantes sont programmées avec le même numéro sur l'unité central, les numéros énoncés ne correspondront pas avec le numéro affiché. Cela pourrait être utile quand plusieurs composantes sont utilisées pour la même chambre, mais pas pour d'autre situation.

TM-02 Instruction pour configuration, émetteur "GhostCord®" (Optionnel)

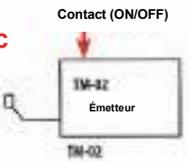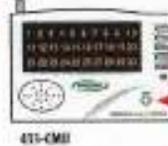- a**  Branchez l'émetteur dans le compartiment prévu du coussinet ou du tapis de sol. Répéter cette étape pour chaque émetteur que vous planifiez utiliser avec le moniteur central.
- b**  Appuyer et tenir le bouton (Record/Add) jusqu'à ce que vous entendiez 2 (dings) et une tonalité longue.
- c**  Mettre sous tension en utilisant le contact (ON/OFF) sur le côté de l'émetteur
- d**  Appuyez sur le coussinet, tapis de sol. Le moniteur central parlera et indiquera un numéro. Le numéro affiché correspondra à l'émetteur sur le moniteur central.
- e**  Attendez que le moniteur central émette une tonalité longue. Alors répéter l'étape (C et D) avec le prochain émetteur ou suivre les instructions pour configurer un autre composante que vous désiriez ajouter.
- f**  Appuyer sur le bouton (Reset) pour sortir du mode programmation.

433-EXT Instruction pour configuration, contacteur Fenêtre/porte (Optionnel)

- a**  Appuyer et tenir le bouton (Record/Add) jusqu'à ce que vous entendiez 2 (dings) et une tonalité longue.
- b**  Réunir les deux parties du contacteur fenêtre/porte. Le moniteur central parlera et indiquera un numéro. Le numéro affiché correspondra au contacteur sur le moniteur central.
- c**  Attendez que le moniteur central émette une tonalité longue. Alors répéter l'étape (C) avec le prochain contacteur de fenêtre/porte ou suivre les instructions pour configurer un autre composante que vous désiriez ajouter.
- d**  Appuyer sur le bouton (Reset) pour sortir du mode programmation.

Si vous n'attendez pas que le moniteur central émette une longue tonalité avant d'appuyer sur le prochain bouton d'appel ou autre composante, chaque composante sera configuré avec le même numéro sur le moniteur central. Dans ce cas, les numéros énoncés ne concorderont pas avec les numéros affichés. Quand plusieurs composantes sont programmées avec le même numéro sur l'unité central, les numéros énoncés ne correspondront pas avec le numéro affiché. Cela pourrait être utile quand plusieurs composantes sont utilisées pour la même chambre, mais pas pour d'autre situation.



Bouton Record/Add

Utilisez ce bouton si vous désirez:

1. Programmer un bouton d'appel ou une autre composante dans un nouvel emplacement ou dans un espace libre.
2. Effacer tous les boutons d'appel ou autres composantes déjà programmé dans le moniteur central

Pour programmer un nouveau bouton d'appel ou un autre composante dans un espace vide ou un système vide.

1. Référez vous aux pages précédente pour les instructions spécifique d'une nouvelle composante, Si vous n'attendez pas que le moniteur central émette une longue tonalité avant d'appuyer sur le prochain bouton d'appel ou autre composante, chaque composante sera configuré avec le même numéro sur le moniteur central. Dans ce cas, les numéros énoncés ne concorderont pas avec les numéros affichés. Quand plusieurs composantes sont programmées avec le même numéro sur l'unité central, les numéros énoncés ne correspondront pas avec le numéro affiché. Cela pourrait être utile quand plusieurs composantes sont utilisées pour la même chambre, mais pas pour d'autre situation.

Pour effacer tous les boutons et les autres composantes présentement programmées dans le moniteur central:


1. Appuyer et tenir le bouton (Record/Add) jusqu'à ce que vous entendiez 2 ding et une longue tonalité.
2. Appuyer sur le bouton (Reset) pour quitter le monde de programmation.

ATTENTION: En appuyant sur le bouton (Record/Add) tous les programmations seront effacés du moniteur central. Après avoir pressé le bouton (Record/Add), tous les boutons d'appels ou autres composantes qui ont été programmé dans le moniteur central ne seront plus reconnues dans le moniteur central tant qu'elles n'auront pas été reprogrammées. Les numéros clignoteront de façon aléatoire pour indiquer qu'il n'y a pas de bouton d'appel ou autres composantes présentement programmées dans le moniteur central.




Lumière de programmation

Indique quand le moniteur central est en mode de programmation. Si la lumière est allumée, le moniteur est en mode de programmation. Si la lumière est éteinte le moniteur n'est pas en mode de programmation.

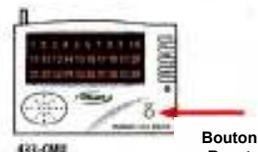

Bouton (Reset)

1. Appuyer une fois pour quitter le mode programmation.
 2. Appuyer une fois pour réinitialiser et effacer les appels en mémoire.
- ATTENTION: Appuyer sur le bouton (Reset) effacera l'historique du moniteur central et causera comme problème l'inaccessibilité pour consulter les appels précédents.

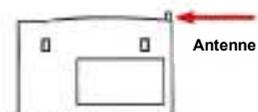


Antenne

Allonger l'antenne au maximum afin d'avoir une réception et émission de meilleur qualité entre le Moniteur central et les boutons d'appel ou autre composantes ou une réception de longue portée entre le Moniteur central et le téléavertisseur.

Arrière du 433-CMU


Installation au mur du 433-CMU

- 1- Glisser la base hors du moniteur central.

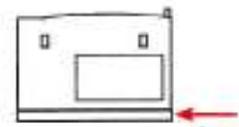


Arrière du 433-CMU

- 2- Visser la base au mur avec les crochets vers l'avant.

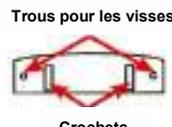

Crochets

- 3- Glisser le moniteur central dans la base maintenant fixé au mur, aligner les crochets avec ceux de la base

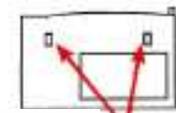


Arrière du 433-CMU
Crochets

Interrupteur (Call/Alarm)




- Quand l'interrupteur est a la position (Cal) le moniteur central donnera l'alarme vocalement en donnant le numéro de la composante activé.
- Quand l'interrupteur est à la position (Alarme) l'appel mentionné ci haut sera précédé par une alarme sonore.

Sortie pour haut parleur externe

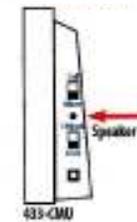


Un haut parleur externe peut être branché dans cette prise si vous désirez augmenter la capacité du son.

Interrupteur (Unlock/Lock)

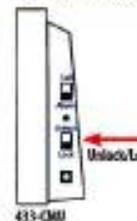

- À (Unlock) pour programmer
- À (Lock) pour prévenir la perte de donnée.

Courant CC (DC)

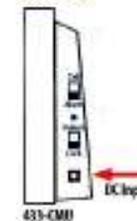

Permet en utilisant un adaptateur de brancher le moniteur central à la prise CA murale. (Modèle de l'adaptateur Smart # AC-04)

Note:

- Des piles faibles affecterons les performances. Le symbole de pile indique que la puissance des piles est basse. Remplacer les piles quand ce symbole apparaît sur le moniteur central.
- Il n'y a pas d'interrupteur sur le moniteur central (ON/OFF). Si vous n'utilisez pas un adaptateur (AC-04) et que vous utilisez les piles, il est recommandé de retirer les piles quand vous n'utilisez pas le moniteur central. Quand les piles sont remplacées il ne sera pas nécessaire de reprogrammer le moniteur central car les composantes resterons en mémoire
- Pour éviter les interférences extérieurs. Quand vous programmez une nouvelle composante, assurez vous que aucune autre composante n'est active et à la portée du moniteur central. Le symbole indique que une composante est active et à la porté du moniteur central.
- Pour vous assurer une réception maximale et réduire les interférences électrique, ne pas placer le moniteur central près d'objet métallique ou autre composantes électrique.
- Ne pas installer dans environnement ayant une température trop chaude ou directement au rayon du soleil.
- Éviter l'eau ou les endroits humide.
- Les numéros qui clignotent au hasard dans l'écran signifie qu'il n'y a aucune composante de programmée dans le moniteur central.